


GZ-901E 高压电位治疗仪

国家Ⅲ类康复理疗器械

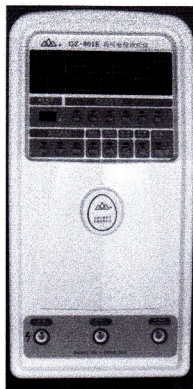

生产企业名称：上海山健医疗器械有限公司
产品名称：高压电位治疗仪。规格型号：GZ-901E
注册证号：国食药监械（准）字2014第3260214号
生产许可证号：沪食药监械生产许20061366号
专利号1：ZL 2005 3 0035420.5 专利类型：外观设计专利
专利号2：ZL 2010 2 0188024.1 专利类型：实用新型专利

高压电位治疗仪特点简介

本产品由主机和通电布二大部分组成，主机内有面板功能显示、控制器、高压变压器、电源等部分组成，通电布把三种电能（电位输出、负电位输出、高周波输出）通过通电布输出电场作用于人体。

本产品有三种电能输出形式：电位输出、负电位输出、高周波输出。仪器的控制器能够把上述的电能通过通电布产生电场作用于人体，通过促进血液循环、调节植物神经及内分泌系统的功能，提高人体的免疫力。从而达到它的预期用途：辅助治疗失眠和功能性便秘。

本治疗仪适用范围：

用于辅助治疗失眠和功能性便秘。

使用方法：


- ①请在绝缘垫上放上椅子。
- ②将通电布放在椅子的座面上。
- ③将高压连接线插口连接通电布。
- ④将高压连接线插头插入电位输出孔中。

*说明：

以上是在电位治疗时的连接方法。如要选择负电位及高周波的治疗，只需把步骤④改为插入负电位孔中或者高周波孔中即可。

*详细使用方法请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。

治疗仪使用连接图：

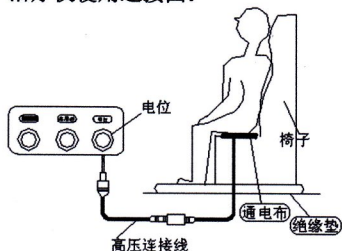

治疗仪主要性能指标

医疗器械管理分类：Ⅲ类。

电源电压：交流220V。

输入功率：≤30VA。

治疗电压：电位值3500V、7000V、9000V；

负电位值2000V；

高周波电压有效值900V；

高周波频率值80KHz。

治疗时间：定时5分钟、10分钟、15分钟、

30分钟、1分钟—8小时

输出波形：交流正弦波形、直流波形。

输出口：电位、负电位、高周波。

禁忌内容和注意事项：

- 1、使用下述医用电气设备的患者不能同时使用本治疗仪进行治疗：
 - 有植入式心脏起搏器等植入体内的电子设备；
 - 维持生命的人工心肺机等设备；
 - 随身佩戴的心电测量设备。
- 2、下述患者应经专业医生同意后方可使用本设备：
 - 急性病患者；
 - 恶性肿瘤患者；
 - 传染病患者；
 - 怀孕及妊娠中的妇女；
 - 心脏病患者；
 - 发高烧的患者；
 - 正在接受治疗或身体有异状者。

联系我们：上海山健医疗器械有限公司

地址：上海浦东新区虹星路695弄2号1幢、2幢

邮编：201209 交通：近上海浦东凌空路。

电话：02150681790 传真：021—50681796

全国免费服务电话：4000 6262 36

公司网址：www.sh-shanjian.com

联系邮箱：sh_shanjian695_2@126.com

*其它禁忌内容或注意事项详见使用说明书。